

電子式ガスブレンダー


設定、モニタリングそして表示

電子式ガスブレンダー(EGB)は体外循環に必要な空気+酸素、 FiO_2 、そして CO_2 ガスの流量を正確に設定し、モニタリングと表示を行える装置です。

ガスの流量値はEGB本体またはスタックカート人工心肺装置S5のシステムパネルで設定しモニタリングすることができます。設定されたガス流量値は連続的に実測値と比較され、患者にガスが正確に供給されていることを確認します。設定値と実測値が逸脱している場合、音声と視覚でのアラームにより操作者に警告します。

EGBはS5のマストのどの位置でも設置できます。また、オプションのコンソールホルダーを用いることにより4基および5基用のS5コンソールの足元に設置することも可能です。

ガス流量値はS5を通してデータ出力をすることができ、自動記録などのソフトへの取り込みが可能です。

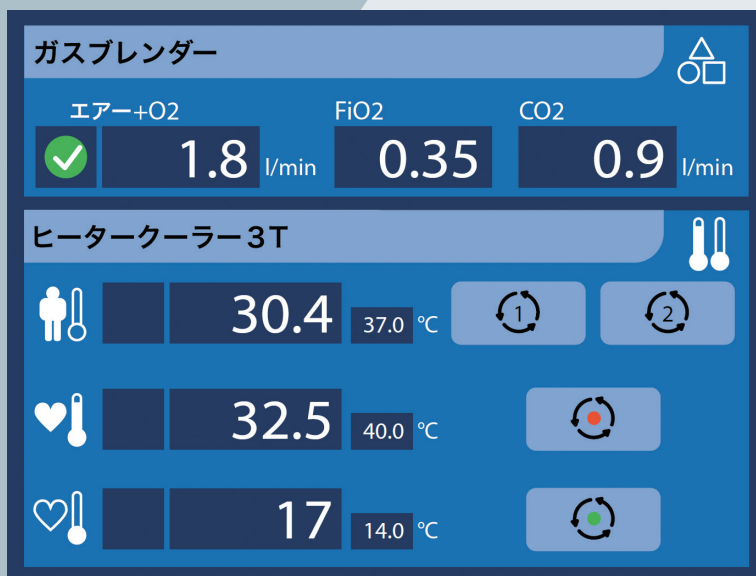

製品に含まれるもの:

- ガスブレンダー本体
- S5への接続ケーブル(長さ:2m)
- コネクター4つ(空気、酸素、CO₂、ガス流出口)
- ファストクランプ付マストホルダー

オーダーインフォメーション

品 名	製品番号
ガスブレンダーシステム (10L/min仕様)	25-28-67
S5用接続ケーブル (標準付属品)	45-12-02
ファストクランプ付マストホルダー(標準付属品)	55-91-50
S5ガスブレンダー用コンソールホルダー(オプション) (S5コンソール4基用、5基用のみ対応)	25-40-70



主な技術仕様

電気の仕様	
入力電力	24V
(スタックカート人工心肺装置S5より供給)	
消費電力	40W
酸素+空気	
流量調整範囲	0.0, 0.2~10.0 L/min
分解能	0.1 L/min
FiO ₂	
設定範囲	0.21~1.00
分解能	0.01
CO ₂	
流量設定範囲	0.0, 0.2~1.0 L/min
分解能	0.01 L/min

寸法、重量

寸法(幅×高さ×奥行) ※高さは脚部分を除く	200mm×121mm×270mm
重量	5.7kg



販売名:スタックカート人工心肺装置S5
 医療機器承認番号:22000BZ100004000
 *ご使用の際は製品添付文書をよくお読み下さい。

選任製造販売業者
ソーリン・グループ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2-11-1
 TEL:03-3595-7630 FAX:03-3595-7631